



Bedienungsanleitung



**Teleskopstützen für Pedalo,
verstellbar von 62-94 cm, Paar**

Art.-Nr. 02312

▶▶▶ zum Produkt ...

Pedalo Trainer

▶▶▶ zur Kategorie...

Anleitung

512041-01 Ersatzteil Teleskopstütze Unterteil

Anleitung bitte lesen und aufbewahren



Sollte ein defektes Teleskopstützenunterteil ersetzt werden gehen Sie wie folgt vor:

Demontieren Sie an der alten Stütze den Power Grip Hebelverschluss
(mit Innensechskantschlüssel 3 mm)

Montieren Sie den Power Grip Hebelverschluss an das neue Stützenunterteil.
Achten Sie darauf, dass der Hebel nach außen zeigt. (Richtung stumpfer Winkel der Anschraubplatte) Die Befestigungsschraube so fest andrehen dass sich der Power Grip nicht von Hand verdrehen lässt.

Das alte Teleskopstützenoberteil sowie die Befestigungsschrauben fürs Trittbrett können Sie weiterhin verwenden.

Die Montage der gesamten Stütze erfolgt wie gehabt mit 2 St. durchgehenden M8 Schrauben.



==== www.sport-tec.de ====

Sport-Tec GmbH
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0

Fax: +49 (0) 6331 1480-220

E-Mail: info@sport-tec.de

Web: www.sport-tec.de