



# KIRSCHKERNSÄCKCHEN / -GÜRTEL MIT BAUMWOLLBEZUG ANLEITUNG

Art.-Nr. ☑ 21940 · Kategorie: ☑ Wärmekissen

Lesen Sie diese Anleitung vor der Anwendung genau durch. Befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

## ALLGEMEINES

Kirschkerensäckchen und Kirschkerngürtel spenden Ihnen wohlige Wärme an kalten Tagen. Durch Form und Füllung passen sich Säckchen und Gürtel gut an den Körper an. Bei der Erwärmung läßt sich der trockene Kirschkerne mit Hitze auf und gibt diese gezielt ab.

## SICHERHEITSHINWEISE

Achtung: Bei Überhitzung besteht Brandgefahr! Vor erneutem Erwärmen vollständig auskühlen lassen (ca. 60 Minuten). Bitte beachten Sie bei der Erhitzung die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräteherstellers. Lassen Sie das Säckchen und den Gürtel während des Erwärmens nie unbeaufsichtigt.

## HINWEISE ZUR BENUTZUNG

Kirschkerneprodukte haben in der Anfangszeit einen Eigengeruch, der sich beim Erhitzen entwickelt. Dieser verliert sich nach einiger Zeit.

Waschen Sie das Säckchen bzw. den Gürtel nicht, um Schimmelbildung zu verhindern. Lagern Sie das Produkt trocken und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.

## ERWÄRMUNG IM BACKOFEN

Packen Sie das Säckchen bzw. den Gürtel vor dem Erhitzen komplett in Alufolie ein, um den Stoff vor Verbrennungen zu schützen. Durch das Einwickeln mit Alufolie erwärmen sich die Kirschkerne außerdem schneller.

Im vorgeheizten Backofen für ca. 6 - 8 Minuten bei 150°C erwärmen. Dazu auf ein Backblech legen, nicht auf einen Rost. Säckchen bzw. Gürtel darf die Seiten des Backofens nicht berühren.

Nach dem Erwärmen gut durchschütteln, sodass sich die Wärme gleichmäßig verteilt.

## ERWÄRMUNG IN DER MIKROWELLE

Für ca. 90 Sekunden bei 600 Watt in der Mikrowelle erwärmen. Für eine gleichmäßige Erwärmung während der Aufwärmphase mehrmals wenden.

Sollte die gewünschte Temperatur nach Ablauf der eingestellten Zeit noch nicht erreicht sein, gut durchschütteln und für weitere 15 Sekunden erwärmen. Vorgang so lange wiederholen, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.

## PFLEGE UND REINIGUNG

Waschen Sie das Säckchen bzw. den Gürtel nicht, um Schimmelbildung zu verhindern.

## ENTSORGUNG

Das Produkt kann über den Hausmüll entsorgt werden.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	Kirschkersäckchen mit Baumwollbezug			Kirschkernherz
Art.-Nr.	21930	21932	21935	21940
Farbe	print	print	print	rot
Gewicht	400 g	400 g	700 g	400 g
Maße (BxTxH)	19x19 cm	19x19 cm	26x23 cm	23x20 cm
Inhalt	Kirschkerne			
Material	100% Baumwolle			
Ursprungsland	Made in Germany			

	Kirschkersäckchen mit Baumwollbezug		Kirschkernherz
Art.-Nr.	21933	21934	21931
Farbe	rot	rot	rot
Gewicht	800 g	1.400 g	1.080 g
Maße (BxTxH)	30x23 cm	36x42 cm	32x18 cm
Inhalt	Kirschkerne		
Material	100% Baumwolle		
Ursprungsland	Made in Germany		



==== [www.sport-tec.de](http://www.sport-tec.de) ====

**Sport-Tec GmbH**  
**Physio & Fitness**  
Lemberger Str. 255  
D-66955 Pirmasens

**Tel.:** +49 (0) 6331 1480-0  
**Fax:** +49 (0) 6331 1480-220  
**E-Mail:** [info@sport-tec.de](mailto:info@sport-tec.de)  
**Web:** [www.sport-tec.de](http://www.sport-tec.de)