



THERAPIELIEGE SMART ST5 DS

ANLEITUNG

Art.-Nr.  23328 · Kategorie:  Therapieliege Smart ST

Eigenschaften und technische Spezifikationen der Modelle:

Mod.

“Cezanne Pro”

- 239200

- 239200P 7 settori

- 239200R

- 239200PR

“SMART ST”

- 240015

- 240015P 5 settori

- 240015R

- 240015PR

- 241015

- 241015P 3 settori

- 241015R

- 241015PR



**THIS DIESE ANLEITUNG SOLLTE MIT DEN ALLGEMEINEN
SICHERHEITSHINWEISEN AUFBEWAHRT WERDEN**

- Typenschild
- Konformitätserklärung
- Bedienelemente
- Ersatzteile und Hilfe

**DIESE ANLEITUNG MUSS VOR INSTALLATION UND GEBRAUCH
DURCHGELESEN WERDEN**

Die Anleitung ist in Reichweite aufzubewahren und bei Bedarf hinzuzuziehen.

INHALT

I.	WARENZEICHEN UND ETIKETT	3
II.	KLASSIFIZIERUNG UND VERWENDUNG	4
III.	TECHNISCHE DATEN	5
IV.	BEDIENUNG UND KONFIGURATION	6
V.	VERBRAUCHSMATERIALIEN UND ERSATZTEILE – KUNDENDIENST	9
	PRODUKT INFORMATION	10
	KONFORMITÄTSERKLÄRUNG UE	11

II.KLASSIFIZIERUNG UND VERWENDUNG

**“Cezanne Pro II” Cod. 239200, 239200P, 239200R, 239200PR
Cod. 240015, 240015P, 240015R, 240015PR
Cod. 241015, 241015P, 241015R, 241015PR**

- Anwendungsteil, Typ B (IEC)
- Elektrische Isolierung, Klasse II
- Schutzart: IPX6
- Maximale Belastbarkeit: 150 kg
- Polster und Bezug Typ 1-IM

- **Ohne** Ersatz-Akku*(1)
- **Mit** Verriegelungsfunktion

Verwendung: Die Therapieliege eignet sich insbesondere für den Einsatz in den Bereichen der Rehabilitation und Physiotherapie, kann aber auch in anderen Bereichen verwendet werden. Die Liege ist gemäß den nachstehend aufgeführten EMV-Angaben zu installieren

! Verwenden Sie das Produkt nicht zu anderen als den angegebenen Zwecken.

! Jeder schwere, durch das Gerät verursachte Unfall muss gemeldet werden. Die Meldung ist an den Hersteller sowie an die zuständige Behörde zu richten.

Es ist **kein** Ersatz-Akku* (1) eingebaut. Die Liege kann daher in sämtlichen Bereichen sicher eingesetzt werden, **außer** in Krankenhäusern und Umgebungen, in denen Notfallmaßnahmen einen kontinuierlichen Betrieb der Liege im Falle einer Unterbrechung der Stromversorgung erfordern können.

Die Liege kann in stark frequentierten Umgebungen, sogar in Anwesenheit von Kindern, sicher eingesetzt werden, da alle Versionen über eine Funktionsverriegelung **verfügen**.

Alle Versionen sind mit der **Trendelenburg**-Funktion ausgestattet.

Elektrischer Motor - Einschaltzeit: alle 18 Min., 2 Min. Pause



***(1)** Der Ersatz-Akku ist optional und kann durch den Hersteller – **ausschließlich das Originalprodukt des Herstellers** – installiert werden.

Ferrox Therapieliegen sind als Medizinprodukte der Klasse I klassifiziert, im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 des EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 5. April 2017 über Medizinprodukte.




III. TECHNISCHE DATEN

Maße

cod. 239200


cod. 240015

cod. 241015

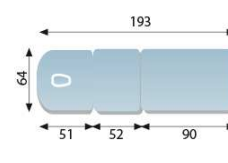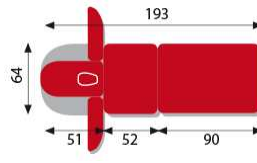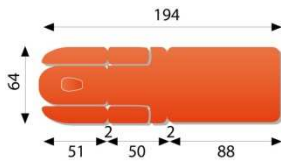


Höhe: **verstellbar 48>90 cm**

Raddurchmesser: **60 mm**

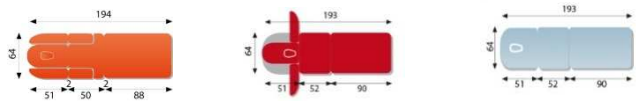FERROX STUDIO	MODELL: “Cezanne Pro II” 		
CEZANNE PRO	239200	240015	241015
CEZANNE PRO mit Fernbedienung	239200P	240015P	241015P
CEZANNE PRO mit Rollen	239200R	240015R	241015R
CEZANNE PRO mit Fernbedienung und Rollen	239200PR	240015PR	241015PR
Leegewicht	100 kg		
Sichere Arbeitslast	150 kg		
Maximale Belastung durch Arbeit	190 kg		
Motor	Elektrisch		
Spannung und Frequenz	100-240 V - Frequenz 50/60 hz		
Strom	1,5 A		
Einschaltzeit	2 Min. aktiv, 18 Min. passiv		
Kraft	8000N für Höhenverstellung 4000N für Rückenlehnenverstellung		
Erwartete Lebensdauer: Der Zeitraum, über den das Gerät verwendet werden kann, wird auf 10 Jahre geschätzt.			

IV. BEDIENUNG UND KONFIGURATION

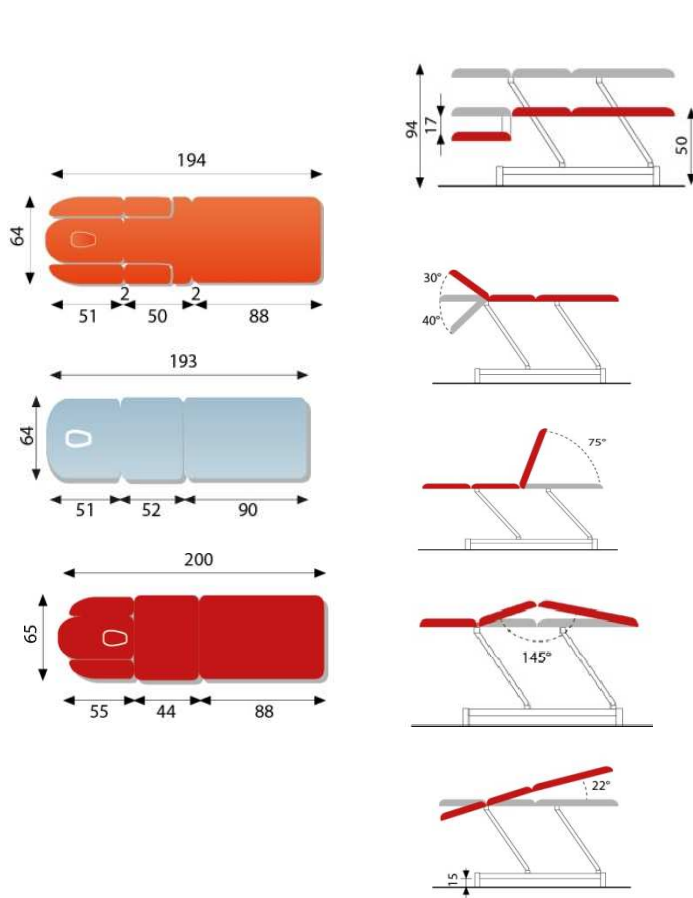

1

239200, 239200R, 240015, 240015R, 241015, 241015R
HÖHENEINSTELLUNG PER HANDSCHALTER

1A

239200P, 239200PR, 240015P, 240015PR, 241015P, 241015PR
HÖHENEINSTELLUNG
PER BEGRENZUNGS-FUSSSCHALTER

2

HÖHENEINSTELLUNG DES KOPFTEILS DURCH
GASDRUCKFEDER

3

EINSTELLUNG DER BEINAUFLAGE
GASDRUCKFEDER


4

EINSTELLUNG DER KYPHOSE-LAGERUNG
PER HANDSCHALTER

5

EINSTELLUNG DER TRENDELENBURG-LAGERUNG PER
HANDSCHALTER UND GASDRUCKFEDER

A) STEUERUNG AKTIVIEREN:

- (I) Zum **Aktivieren**: Drücken Sie den Stift von links nach rechts,
- (O) Zum **Deaktivieren**: Ziehen Sie den Stift heraus
- Drücken Sie die „ON“-Taste, um die Handsteuerung zu aktivieren (grünes Licht leuchtet )

Grünes Licht leuchtet



N.B. Die Handsteuerung muss bei jeder Benutzung neu aktiviert werden

Die Handsteuerung schaltet sich nach 5 Sekunden Inaktivität automatisch ab

B) LIEGE MIT FUSSPEDAL ODER MIT FERNBEDIENUNG



Position **ON (I)** Stromkreis offen – Liege kann aktiviert werden.




Position **OFF (0)** Stromkreis geschlossen
Liege in Sicherheitsposition.



Die voraussichtliche Lebensdauer des Produktes beträgt bei normalen Gebrauch 10 Jahre.


Der Bediener oder Benutzer sollte immer alle Funktionen ausschalten (**Off**) und den Magnet- oder mechanischen Sicherheitsschlüssel entfernen, bevor er die Therapieliege mit dem Patienten darauf unbeaufsichtigt lässt.

NACH JEDEM GEBRAUCH. Vergewissern Sie sich, dass alle Bedienelemente deaktiviert sind, wenn die Liege nicht in Gebrauch ist.

LIEGE MIT 4 MANUELLEN SCHALTERN

	Bedienung	Liege "CEZANNE PRO" elektrisch verstellbare Kopf- und Rückenlehne.
1)		(1) Erhöhung: Doppelklick auf die Taste „1“ zum Einstellen der maximalen Höhe
2)		(2) Absenkung: Doppelklick auf die Taste „2“ zum Einstellen der Mindesthöhe
3)		(3) Doppelklick auf Knopf „3“ zum Anheben der Rückenlehne
4)		(4) Doppelklick auf die Taste „4“, um in die horizontale Position der Liegefläche zurückzukehren

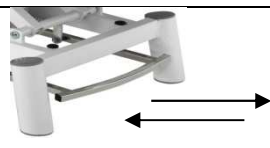	Bedienung	Liege "CEZANNE PRO" mit Verstellung der Rückenlehne per Rundumschaltung.
		Rundumschaltung bei allen Therapieliegen mit Ausnahme der BOBATH-Modelle. Bewegen Sie die Rundumschaltung mit Ihrem Fuß links und rechts nach vorne und zurück, um die Therapieliege hoch- oder herunterzufahren.
1)		(3) Doppelklick auf Knopf „3“ zum Anheben der Rückenlehne
2)		(4) Doppelklick auf die Taste „4“, um in die horizontale Position der Liegefläche zurückzukehren

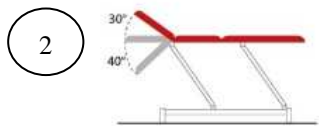


*** REGULIERUNG DER KOPFTEIL-NEIGUNG**



Um das Aus- und Einfahren der Gasdruckfeder zu steuern, ziehen Sie den unter dem jeweiligen Liegenteil positionierten Bedienungshebel. Heben oder senken Sie den entsprechenden Tischabschnitt, bis er die gewünschte Kippstellung erreicht hat. Lassen Sie den Hebel **langsam** los, um den Abschnitt in die gewünschte Kippstellung zu bringen. Abrupte Freigabe sperrt den Abschnitt sofort.


***HÖHENVERSTELLUNG DER ARMLEHNEN: 239200, 239200P, 239200R, 239200PR, 240015, 240015P ,240015R, 240015PR**

Nutzen Sie die Handschraube an der Schiebehülse.

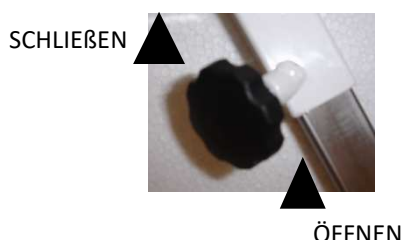

Entriegeln: Drehen Sie das Handrad entgegen dem Uhrzeigersinn ↺. Lösen Sie die Armlehne indem Sie einen leichten Abwärtsdruck ausüben.

Drehen Sie die Handschraube im Uhrzeigersinn ↻ um die Armlehne in der gewünschten Position zu fixieren.
Armlehne zum Öffnen nach außen ziehen und zum Schließen in die entgegengesetzte Richtung drücken.
Führen Sie dieselben Schritte durch, um die Neigung der Armlehne zu verstellen.

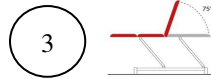

* REGULIERUNG DER NEIGUNG DER BEINABLAGE.

Gasdruckfeder


Um die Kraft der Gasdruckfeder zu steuern, betätigen Sie den Bedienhebel unter dem entsprechenden Liegenabschnitt an. Heben oder senken Sie den betreffenden Liegenabschnitt, bis er die gewünschte Neigung erreicht hat. Lassen Sie den Hebel **langsam** los, um den Abschnitt in die gewünschte Kippstellung zu bringen. **Abruptes** Loslassen sorgt für eine sofortige Verriegelung des Abschnitts.



HINWEIS! VERWENDUNG VON GASDRUCKFEDERN BEI ALLEN FUNKTIONEN:



Achtung: Um Verletzungen von Arzt oder Patient vorzubeugen, halten und neigen Sie den betreffenden Liegenabschnitt mit einer Hand, **bevor** Sie den Hebel für die gasdruckfederunterstützte Neigungsverstellung betätigen, um zu verhindern, dass der Abschnitt in seine Ursprungsposition zurückschnellt.

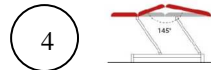

* EINSTELLUNG DER KYPHOSE-LAGERUNG

Elektrisch verstellbar

Aktivierung per Handschalter

- Drücken Sie (3) auf dem Handschalter, um die Rückenposition zu verändern.
- Drücken Sie (4) um wieder die horizontale Position einzustellen.



* EINSTELLUNG DER TRENDELENBURG-LAGERUNG

Gasdruckfeder unterstützte Kopfteileinstellung + elektrisch verstellbare Rückenlehne + Gasdruckfeder unterstützte Beinauflage.

- **Kopfteil:** Heben oder senken Sie den Bereich der Liege, bis die gewünschte Position erreicht ist. Lassen Sie den Hebel **langsam** los, um die gewünschte Position einzustellen. **Abruptes** Loslassen sorgt für eine sofortige Verriegelung des Abschnitts.
- **Beinauflage:** Drücken Sie (3) auf dem Handschalter, bis der Beinbereich eine mittlere Höhe erreicht hat.
- **Fußteil:** Steuern Sie das Aus- und Einfahren der Gasdruckfeder, indem Sie den unter dem Fußteil angebrachten Steuerhebel nach oben drücken. Heben oder senken Sie das Fußteil, bis es die gewünschte Kippstellung erreicht hat. Lassen Sie den Hebel **langsam** los, um die gewünschte Position einzustellen, **abruptes** Loslassen sorgt für eine sofortige Verriegelung des Abschnitts

RÄDER: Wenn vorhanden, drücken Sie den Steuerhebel nach unten, um die Räder abzusenken, bis sie sicher und fest auf dem Boden aufliegen. Die Räder dürfen nur zum Versetzen oder Verschieben des Tisches verwendet werden. Wenn die Räder nicht benötigt werden, müssen sie hochgestellt bleiben (keinen Bodenkontakt).



V. VERBRAUCHSMATERIALIEN UND ERSATZTEILE – KUNDENDIENST

Elektronische Bauteile:



Zum Anheben

T5EM001 ** ACTUATOR TA7 8000N IP66

art. TA7-2300-001 Chargen-Nr. xxxxx

Für Kyphose Funktion

T5EM002 ** ACTUATOR TA23 4000 N IP66

art. TA23-4115-001 Chargen-Nr. xxxxx



T1EM002 ** Speisegerät TP9

art. TP9-4115-001 Chargen-Nr. xxxxx



T3EM002 ** Control box TC14

art. TC14-4115-002 Chargen-Nr. xxxxx



T4EM009 ** FERNBEDIENUNG

art. TH12-4115-004 Chargen-Nr. xxxxx

NUR BEI VERSION MIT FERNBEDIENUNG:



C3EM0181 ** FUNKTIONSVERRIEGELUNG

Chargen-Nr. xxxxx



T4EM009 ** FERNBEDIENUNG

art. TH12-4115-004 Chargen-Nr. xxxxx



T4EM001 ** BEGRENZUNGS-FUSSSCHALTER

art. TES-2300-001 Chargen-Nr. xxxxx



T4EM004 ** DOPPELKABEL FÜR 2 BEDIENEINHEITEN

art. TYC-2300-001 Chargen-Nr. xxxxx

Gasdruckfeder

C3PI0230 ** GASDRUCKFEDER 500 N

art. 756625 Chargen-Nr. xxxxx

C3PI0319 ** GASDRUCKFEDER BOWDENZUG

art. T1186008 Chargen-Nr. xxxxx

C3PI0321 ** VERRIEGELUNG UND HEBEL

art. CMGTA002B Chargen-Nr. xxxxx

RÄDER:

C3RU0982 **

****Referenz für Ersatzteile**

PRODUKT INFORMATION

KENNZEICHNUNGSETIKETT

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG UE

MDR 2017/745



Hersteller:

FERROX s.r.l.

Via del Lavoro 9 - 31013 Codogné (TV) ITALIA

+39 0438 777099 – +39 0438 777091

C. F. - P. IVA - R. I. IT 03613220262

✉: info@ferrox.it

SRN:IT-MF-000011243

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte:

Name	Code	UDI-BASIC:
Liege CEZANNE PRO II 7 SEG. Basisausführung	239200	805347043CEZANNEH5
Liege CEZANNE PRO II 7 SEG. mit Rundumschaltung	239200P	805347043CEZANNEH5
Liege CEZANNE PRO II 7 SEG. mit Rädern and Rundumschaltung	239200PR	805347043CEZANNEH5
Liege CEZANNE PRO II 7 SEG. mit Rädern	239200R	805347043CEZANNEH5
Liege CEZANNE PRO II 5 SEG. Basisausführung	240015	805347043CEZANNEH5
Liege CEZANNE PRO II 5 SEG. mit Rundumschaltung	240015P	805347043CEZANNEH5
Liege CEZANNE PRO II 5 SEG. mit Rädern and Rundumschaltung	240015PR	805347043CEZANNEH5
Liege CEZANNE PRO II 5 SEG. mit Rädern	240015R	805347043CEZANNEH5
Liege CEZANNE PRO II 3 SEG. Basisausführung	241015	805347043CEZANNEH5
Liege CEZANNE PRO II 3 SEG. mit Rundumschaltung	241015P	805347043CEZANNEH5
Liege CEZANNE PRO II 3 SEG. mit Rädern and Rundumschaltung	241015PR	805347043CEZANNEH5
Liege CEZANNE PRO II 3 SEG. mit Räder	241015R	805347043CEZANNEH5

Die Produkte müssen die allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen des Anhangs I sowie die Anforderungen der VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 5. April 2017 erfüllen.

Das Unternehmen erklärt ferner, dass die in dieser Konformitätserklärung angegebenen Produkte:
- der Richtlinie 2011/65/EU (Beschränkung gefährlicher Stoffe) zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, einschließlich der Bestimmungen der von der Europäischen Kommission erlassenen Delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 entsprechen.

Klassifiziert (Anhang VIII, MDR 2017/745):

Klasse I (Regel 1)

Verfahren zur Bewertung der Konformität:

Technische Unterlagen gemäß Anhang II und III.

Datum: 09/01/2023

Verantwortlicher
FERROX s.r.l.

Unterschrift: _____



Management
System
ISO 13485:2016
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 900064946



Stabilimento e sede legale:

via del Lavoro Z.I.

31013 Codogné (TV) Italia

Tel. +39 0438 777099 - 778370

Fax +39 0438 777091

P.IVA: IT 03613220262

e-mail: info@ferrox.it

www.ferrox.it

Vertrieb durch:



==== www.sport-tec.de ====

Sport-Tec GmbH
Physio & Fitness
Lemberger Str. 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0
Fax: +49 (0) 6331 1480-220
E-Mail: info@sport-tec.de
Web: www.sport-tec.de