



Bedienungsanleitung



**Moor-Wärmeträger Exklusiv klein,
für Wasserbad, 33x28 cm, 2000 g**

Art.Nr.: 24510

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Moor Packungen

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)



SPORT-TEC

Physio & Fitness

Ihr kompetenter Partner für hochwertige
Physio- und Fitnessgeräte



Gebrauchsanweisung für Moor - Wärmeträger

Der Wärmeträger beinhaltet einen Wärmespeicher bestehend aus einer Naturmoorfüllung.

Die Außenfolie hat eine äußerste Hitzebeständigkeit von 80°C. In einem Wasserbad wird der Wärmeträger auf ca. 50–60°C erwärmt. Die regelmäßige Erwärmungstemperatur sollte 60°C nicht überschreiten.

Wird der Wärmeträger in einem Wasserbad erwärmt, darf er nicht mit dem Boden des Erwärmungsgerätes in Berührung kommen, da die Folie durch Überhitzung beschädigt werden könnte. Dieses verhindert man, indem ein Sieb auf den Boden des Gerätes gelegt wird.

Anwendungsweise:

Der Wärmeträger wird auf die zu behandelnde Stelle des Körpers aufgelegt und der Patient mit Folien und Decken gut eingepackt. Der Wärmeträger wird mit besonders gutem Erfolg in Verbindung mit Heilmoorpackungen N (Einwegpackungen) benutzt.

Sicherheitshinweis für den Anwender:

Der Anwender hat dafür Sorge zu tragen, daß der erwärmte Wärmeträger nicht bei einer höheren Temperatur als vorgesehen angewendet wird.

Die Behandlungsdauer beträgt ca. 25–50 Minuten. Um die behandelnde Fläche zu vergrößern, legt man entsprechend zwei oder mehrere Wärmeträger aneinander.

Reinigung:

Die Verwendung von scharfen Reinigungsmitteln ist zu vermeiden. Wenn die ob. Punkte zur Pflege beachtet werden, läßt sich die Lebensdauer unserer Wärmeträger erhöhen. Größe : 28 x 33 cm Inhalt ca. : 2000 g/6 Stück je Karton

Größe : 56 x 33 cm Inhalt ca. : 4000 g/3 Stück je Karton

Zur besonderen Beachtung:

Zum eigenen Schutz sollte der Anwender während der Erwärmung des Wärmeträgers und der Vorbereitung zur Anwendung beim Patienten Schutzhandschuhe tragen. Nicht im Wasserbad kochen lassen.

Vor dem Auflegen durch Drücken auf Dichtigkeit prüfen.

Nicht mit scharfen oder kantigen Gegenständen die Außenfolie beschädigen.

Der Wärmeträger hat bei sachgemäßer Anwendung und täglichem Gebrauch eine Benutzungsdauer von ca. 6 Monaten.



Sport-Tec
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de
www.sport-tec.de