



Bedienungsanleitung



**Goniometer Winkelmesser,
Schenkellänge 35-65 cm**

Art.Nr.: 25304

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Winkelmesser

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

Ausziehbares Goniometer

Nutzungshinweise

- Positionieren Sie Ihren Patienten in der richtigen Position.
- Stabilisieren Sie seinen Körper und den proximalen Gelenkbereich, um so die Bewegung an dem zu untersuchenden Gelenk zu isolieren.
- Passen Sie die Schenkel des Goniometers an die proximalen und distalen Segmente des zu untersuchenden Gelenks an. Ziehen Sie die Schenkel nun so weit aus, bis Sie über den standardisierten anatomischen Knochenorientierungspunkten des zu untersuchenden Gelenks liegen.
- Lesen Sie nun von der Messskala ab:
 - Es ist wichtig, dass Sie korrekte Skala von einem Goniometer mit Doppelskala ablesen. Eine zuvor getroffene visuelle Schätzung hilft Ihnen dabei, die korrekte Skala auszuwählen
 - Zentrieren Sie die Leselinie innerhalb und wählen Sie die geeignete Skala um den Wert abzulesen.

Spezifikationen

- Minimale Schenkellänge: 20,32 cm (8.0")
- Maximale Schenkellänge: 71,12 cm (28.0")
- Gehäuse Durchmesser: 6,35 cm (2.5")
- Dicke: 2,06 cm (0.8125")
- Gewicht: 0,09 kg (0,2 lbs)
- Arm Rotation: 360° (in beide Richtungen) durch stabiles Drehgelenk
- 4-fach vergrößernde Lupe
- Index Skala: Doppelskala 0°-180° & 180°-0° in 1° Stufen
- Gehäuse Material: Graues ABS Plastik
- Schenkel Material: Chrom überzogenes Messing
- Durchmesser des Anzeigefensters: 1,74 cm (0.6875")





Sport-Tec
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de
www.sport-tec.de