



Bedienungsanleitung



Bubble Inclinometer

Art.Nr.: 25324

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Winkelmesser

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

Clinical Goniometer Bubble Inclinometer



GEBRAUCHSANWEISUNG

Sie bekommen maximale Genauigkeit wenn Sie:

- den Goniometer so halten das die Skala vertikal ist.
- die Skala ablesen von der Unterseite von den Meniskus von die Linker Seite von die Flüssigkeit Säule.
- die Flüssigkeit Zeit gebe, zum setzen bevor ablesen.
- die Goniometer nicht bewegen lassen gegenüber das gemessene Gelenk.



NULL SETZUNG

- Setzen Sie den Goniometer mit das Gelenk in neutrale Position.
- Rotieren Sie die Skala bis den Pfeil die Unterseite der Meniskus bezeichnet.
- Den Goniometer ist nun Kalibriert zum messen der Bewegungsradius von das gewählte Gelenk.

NULL KALIBRIERUNG

- Setzen Sie den Goniometer auf seine Seite oder Ende auf eine Horizontalebene Oberfläche.
- Rotieren Sie die Skala bis den Pfeil die Unterseite der Meniskus bezeichnet.
- Den Goniometer ist nun Kalibriert zum ablesen von den genauen Ausschlag gegenüber Horizontal und Vertikal.

METHODE ZUR ABLESUNG DER GEMESSENE WINKEL

- Lesen Sie den Winkel am Meniskus ab, mit das Gelenk in die gewünschte Position.
- Gebrauchen Sie die außer Skala für Anti-Glockweise Bewegungen.
- Gebrauchen Sie die inner Skala für Glockweise Bewegungen.



Sport-Tec
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de
www.sport-tec.de