



# Bedienungsanleitung



**DESTIX Desinfektionstücher XXL in  
Spenderbox-Set, 200 Stück inkl.  
Nachfüllpack, 200 Stück**

**Art.-Nr. 28587**

**▶▶▶ [zum Produkt ...](#)**

**Flächendesinfektion**

**▶▶▶ [zur Kategorie...](#)**

Lesen Sie diese Hinweise vor der Anwendung genau durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Beachten Sie, dass eine nicht ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu Verletzungen führen kann!

## ANWENDUNGSGBIETE

Destix Med ist ein flüssiges Reinigungs- und Flächendesinfektionsmittel für Oberflächen in Krankenhaus, Praxis, Haushalt usw. Je nach Oberflächenstruktur 20-50ml/qm verwenden. Für eine desinfizierende Wirkung muss Destix Med unverdünnt, mindestens 1 Minute lang auf die Oberfläche einwirken. Die desinfizierte Oberfläche kann nach dem Abtrocknen wiederbenutzt werden.

Destix Med besitzt zusätzlich, durch den ausgewogenen Alkoholanteil eine hervorragende Reinigungswirkung und entfernt mühelos Talg- und Fettablagerungen, Staubpartikel, Nikotinrückstände usw.

## WIRKMECHANISMUS UND WIRKSAMKEIT

Auflösen der Zellmembran, dadurch Zerstörung der Mikroorganismen.

Getestete Mikroorganismen	Einwirkzeit
<b>Bakterien:</b> Staphylococcus aureus	1 Minute
Escherichia coli	1 Minute
Pseudomonas aeruginosa	1 Minute
Proteus mirabilis	1 Minute
<b>Pilze:</b> Candida albicans	1 Minute
<b>Viren:</b> HBV	1 Minute
HCV	1 Minute
HIV	1 Minute

## WIRKSAME BESTANDTEILE

100 g enthalten: 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,25 g Alkylethylbenzoldimethylammoniumchlorid, 0,25 g Alkylbenzoldimethylammoniumchlorid, 20 g Ethylalkohol, 10 g 1-Propanol

## UMWELTVERHALTEN

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

## LAGERBEDINGUNGEN

Das Destix Reinigungs- und Flächendesinfektionsmittel sollte in gut verschlossenen Gebinden in kühlen Räumen gelagert werden (siehe auch Sicherheitsdatenblatt). Nach Ablauf der Haltbarkeit nicht mehr verwenden.

## REGISTRIERUNG UND KENNZEICHNUNG

Die Desinfektionsprodukte sind bei der BAUA (Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) registriert.

Das Produkt ist gemäß Gefahrstoffverordnung eingestuft und gekennzeichnet.

**Allgemeiner Hinweis! Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Gebrauchshinweise und Produktinformationen lesen.**

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	Destix Desinfektionstücher		
Art.-Nr.	28580	28582	28583
Art der Verpackung	Spenderbox	Nachfüllpack	Spenderbox inkl. Nachfüllpack
Inhalt	120 Tücher (13x20 cm), 2,6 m <sup>2</sup>	120 Tücher (13x20 cm), 2,6 m <sup>2</sup>	2 x 120 Tücher (13x20 cm), 2,6 m <sup>2</sup>
Ursprungsland	Made in Germany		

	Destix Desinfektionstücher		
Art.-Nr.	28584	28582	28587
Art der Verpackung	Spenderbox	Nachfüllpack	Spenderbox inkl. Nachfüllpack
Inhalt	200 Tücher (21x26 cm), 10,92 m <sup>2</sup>	200 Tücher (21x26 cm), 10,92 m <sup>2</sup>	2 x 200 Tücher (21x26 cm), 10,92 m <sup>2</sup>
Ursprungsland	Made in Germany		



**Sport-Tec GmbH**  
**Physio & Fitness**

Lemberger Straße 255  
D-66955 Pirmasens

**Tel.:** +49 (0) 6331 1480-0

**Fax:** +49 (0) 6331 1480-220

**E-Mail:** info@sport-tec.de

**Web:** www.sport-tec.de

