

GEBRAUCHSANLEITUNG – ANTI-RUTSCH-FOLIE

Die Dycem Anti-Rutsch-Folien gibt es in verschiedenen Größen und Farben. Die Folie kann individuell zugeschnitten werden und unauffällig unter Gegenständen in der Klinik oder zu Hause platziert zu werden. Die Folie haftet beidseitig ohne Klebstoff.

Erhältlich in zwei Breiten:

20 cm oder 40 cm

Verschiedene Längen:

1 m, 2 m, 5 m, 9 m und 15 m




So verwenden Sie Dycem Anti-Rutsch-Folie:

- Einfach die Folie von der Rolle abrollen.
- Auf die gewünschte Größe und Form zuschneiden.
- Das Produkt ist anschließend gebrauchsfertig.

Typische Verwendungszwecke:

- Unter Tellern und Rührschüsseln für eigenständiges Essen und Speisen
- Auf Tablettts und Kipptischen
- Unter Kissen
- Auf Armlehnen und Sitzflächen, um ein Verrutschen zu verhindern.

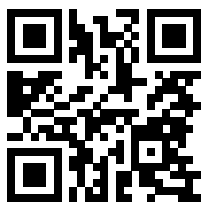

**Dycem Ltd**

Ashley Trading Estate, Bristol BS2 9BB, United Kingdom
Tel: +44 (0) 117 955 9921
Fax: +44 (0) 117 954 1194

Dycem Corporation

33 Appian Way, Smithfield, RI 02917, USA
Tel: 1-800 458 0060
Fax: 401-738-4420

Dycem Europe GmbH

Vogesensstraße 6, 76437 Rastatt,
Baden-Württemberg, Germany
Tel: +49 7222 781 31 07

nonslip@dycem.com

© 2025 Dycem Ltd. All rights reserved

**Reinigung:**

Wenn die Folie staubig wird, können Sie die Rutschfestigkeit einfach wiederherstellen, indem Sie die Folie in warmem Seifenwasser waschen und trocknen lassen.

Alkoholtücher können ebenfalls zur Reinigung der Produkte verwendet werden.

Gut zu wissen:

Dycem verfügt über eine integrierte antimikrobielle Technologie, die einen effektiven Produktschutz rund um die Uhr vor Mikroben bietet, die zu Zersetzung, Flecken oder Gerüchen führen können.

Bitte beachten:

- Dycem ist im nassen Zustand nicht wirksam. Daher sollten die Produkte nicht im Badezimmer verwendet werden.
- Bitte nicht Temperaturen über 50 °C (122 °F) aussetzen.
- Dycem-Produkte sollten nicht in die Mikrowelle oder in den Autoklav gegeben werden.

